



# Disinfettante alto livello Germocid per ferri chirurgici 1Lt

Germocid Instruments 1 Lt Disinfettante di alto livello per ferri chirurgici - Cf 1pz



**Product codes:**

Reference: 40 859 1014

**Product gallery:**

**Product description:**

Disinfettante di alto livello per ferri chirurgici.

Dispositivo Medico CE 0546 di classe lib conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID INSTRUMENTS è una soluzione concentrata attiva sia contro i batteri Gram positivi sia Gram negativi, i funghi, i micobatteri e i virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) che svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante, prima della sterilizzazione in autoclave, di strumenti chirurgici invasivi contaminati da materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici).

La soluzione diluita è priva di aldeidi, coloranti, sostanze tossiche.

Gli specifici inibitori di corrosione garantiscono l'assoluta compatibilità del prodotto con i materiali



più frequentemente utilizzati in ambito odontoiatrico ed ospedaliero.

Composizione:

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g; coformulanti; acqua depurata q. b. a 100,00 g.

Come si usa: Il prodotto si usa diluito in acqua in concentrazioni variabili a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere.

Per preparare la soluzione utilizzare il misurino in dotazione. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo.

La soluzione rimane stabile per una settimana.

In caso di uso frequente e con strumenti particolarmente contaminati o sporchi si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente. Può essere utilizzato anche in vasche a ultrasuoni.

Per uso professionale.

Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

### Product features:

DCT - TYP: decontaminante strumenti

DCT - TYP: decontaminante

DCT - TYP: detergente

DCT - FORM: flüssige

DCT - BESONDERHEIT: diluibile in acqua a concentrazione variabile a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere

DCT - EFFEKT: detergente

DCT - EFFEKT: decontaminante

DCT - VERWENDBAR AUF: acciaio

DCT - VERWENDBAR AUF: bagni ultrasuoni

DCT - VERWENDBAR AUF: strumenti chirurgici invasivi

DCT - AKTIV GEGEN: batteri

DCT - AKTIV GEGEN: micoplasmi

DCT - AKTIV GEGEN: funghi

DCT - AKTIV GEGEN: virus

DCT - AKTIV GEGEN: lieviti

DCT - GEEIGNET IN: ambito odontoiatrico

DCT - GEEIGNET IN: ambito ospedaliero

DCT - SCREENING-ANWENDUNGEN: neutro/inodore

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: 93/42/CEE

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14476

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14563

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14348

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14562

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN13624

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14561

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN13727

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE 0546

DCT - VERPACKUNG: flacone