



# Detergente Germocid Alkanet per trattamento in lavastrumenti automatiche e bagni

Germocid Alkanet 3 Lt Detergente alcalino per il lavaggio di dispositivi medici e strumenti medicali. - Cf 1pz



**Product codes:**

Reference: 40 859 0394

**Product gallery:**

**Product description:**

Detergente alcalino per il lavaggio di dispositivi medici e strumenti medicali.

Germocid Alkanet e? un Dispositivo Medico CE 0546 di classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

detergente alcalino adatto alla rimozione di sangue, proteine, mezzi di coltura, residui di cibo e sporco in genere senza alterare i materiali.

Questo prodotto e? efficace per il trattamento di strumentario chirurgico in acciaio, acciaio inox, articoli ottici, vetreria da laboratorio, plastiche convenzionali e strumentario per anestesia.

Per altri tipi di materiali (ad esempio alluminio e leghe leggere) si raccomanda di testare la



compatibilità? con il prodotto.

Puo? essere utilizzato sia in apparecchiature lava strumenti automatiche che per trattamenti in bagni ad immersione o ad ultrasuoni.

Contiene ingredienti ecocompatibili che prevengono il rideposito dei residui riducendo la tensione superficiale delle soluzioni di utilizzo.

Come si usa

La fase di neutralizzazione, obbligatoria con i detergenti alcalini classici, con GERMOCID ALKANET non e? necessaria. Nel trattamento di strumentario oftalmico si raccomanda un risciacquo intermedio aggiuntivo prima del risciacquo finale. Rinnovare la soluzione d'immersione una volta al giorno.

Non miscelare ad altri prodotti. Rispettare le istruzioni del fabbricante di strumentario e le indicazioni del produttore dell'apparecchiatura di lavaggio. Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

### Product features:

DCT - TYP: detergente

DCT - FORM: flüssige

DCT - BESONDERHEIT: detergente alcalino adatto per lavastrumenti automatiche e bagni immersione - ultrasuoni senza necessità di fase neutralizzazione

DCT - EFFEKT: detergente

DCT - VERWENDBAR AUF: bagni termostatici

DCT - VERWENDBAR AUF: acciaio

DCT - VERWENDBAR AUF: bagni ultrasuoni

DCT - VERWENDBAR AUF: articoli ottici

DCT - VERWENDBAR AUF: vetreria

DCT - VERWENDBAR AUF: plastiche

DCT - VERWENDBAR AUF: alluminio

DCT - VERWENDBAR AUF: lavastrumenti

DCT - AKTIV GEGEN: sporco

DCT - GEEIGNET IN: laboratorio generale

DCT - GEEIGNET IN: ambito ospedaliero

DCT - SCREENING-ANWENDUNGEN: neutro/inodore

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: 93/42/CEE

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: DM classe I

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE 0546

DCT - VERPACKUNG: tanica