



Disinfettante spray per ambienti alta frequentazione - attivo sulla famiglia dei Coronavirus

Disinfettante spray 400 ml per ambienti ad alta frequentazione - Attivo sulla famiglia dei coronavirus - tempo di azione 15m. Cf 1pz



Product codes:

Reference: 50 859 5001

Product gallery:

Product description:

Spray disinfettante - presidio medico chirurgico

Indicato per disinfettare e deodorare gli ambienti ad alta frequentazione ed a maggior rischio infettivo come ambulatori, sale d'attesa, aule scolastiche, mense, centri sportivi, palestre, centri di accoglienza, bagni pubblici e in tutti quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell'igiene, in quanto garantisce le condizioni igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della salute.

Il prodotto non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali. Disinfetta lasciando un gradevole profumo.

Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.

Come si usa:



Per la disinfezione degli oggetti in genere e delle superfici: far precedere un'accurata pulizia delle superfici utilizzando un idoneo detergente, erogare uniformemente il prodotto per 3-4 secondi da una distanza di circa 20 cm dirigendo il getto verso l'area da trattare. Lasciare agire per 15 minuti.

Ripetere il trattamento solo se necessario.

Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Product features:

DCT - TYP: pronto all'uso

DCT - TYP: decontaminante

DCT - FORM: spray

DCT - BESONDERHEIT: decontaminante pronto all'uso per ambienti ad alta frequentazione

DCT - EFFEKT: decontaminante

DCT - VERWENDBAR AUF: tutte le superfici

DCT - AKTIV GEGEN: batteri

DCT - AKTIV GEGEN: funghi

DCT - AKTIV GEGEN: virus

DCT - GEEIGNET IN: ambienti alta frequentazione

DCT - GEEIGNET IN: ambito ospedaliero

DCT - SCREENING-ANWENDUNGEN: presente

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14348

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN13697

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN1276

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN1275

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN1040

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14476

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14563

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14562

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN13624

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN14561

DCT - ÜBEREINSTIMMUNG: EN13727

DCT - VERPACKUNG: flacone spray