



copy of Detergente Germocid Alkanet per trattamento in lavastrumenti automatiche e bagni

Germocid Alkanet 3 Lt Detergente alcalino per il lavaggio di dispositivi medici e strumenti medicali. - Cf 1pz



Product codes:

Reference: 18 861 0021

Product gallery:



Product description:

Detergente alcalino per il lavaggio di dispositivi medici e strumenti medicali.

Germocid Alkanet e? un Dispositivo Medico CE 0546 di classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

detergente alcalino adatto alla rimozione di sangue, proteine, mezzi di coltura, residui di cibo e sporco in genere senza alterare i materiali.

Questo prodotto e? efficace per il trattamento di strumentario chirurgico in acciaio, acciaio inox, articoli ottici, vetreria da laboratorio, plastiche convenzionali e strumentario per anestesia.

Per altri tipi di materiali (ad esempio alluminio e leghe leggere) si raccomanda di testare la compatibilita? con il prodotto.

Puo? essere utilizzato sia in apparecchiature lava strumenti automatiche che per trattamenti in bagni ad immersione o ad ultrasuoni.

Contiene ingredienti ecocompatibili che prevengono il rideposito dei residui riducendo la tensione



superficiale delle soluzioni di utilizzo.

Come si usa

La fase di neutralizzazione, obbligatoria con i detergenti alcalini classici, con GERMOCID ALKANET non e? necessaria. Nel trattamento di strumentario oftalmico si raccomanda un risciacquo intermedio aggiuntivo prima del risciacquo finale. Rinnovare la soluzione d'immersione una volta al giorno.

Non miscelare ad altri prodotti. Rispettare le istruzioni del fabbricante di strumentario e le indicazioni del produttore dell'apparecchiatura di lavaggio. Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Product features:

THE DCT - TYPE: detergente

DCT - SHAPE: liquid

DCT - FEATURES: Detergente liquido per il lavaggio a macchina di ferri chirurgici, ed altri utensili tecnico-medicali e vetrerie di laboratorio

DCT - EFFECT: detergente

DCT - IT CAN BE USED ON: bagni ultrasuoni

DCT - IT CAN BE USED ON: strumenti chirurgici invasivi

DCT - IT CAN BE USED ON: vetreria

DCT - IT CAN BE USED ON: alluminio

DCT - IT CAN BE USED ON: lavastrumenti

DCT - IT CAN BE USED ON: strumenti chirurgici non invasivi

DCT - ACTIVE AGAINST: sporco

DCT - ELIGIBLE IN: ambito ospedaliero

DCT - ELIGIBLE IN: ambito odontoiatrico

DCT - ELIGIBLE IN: laboratorio generale

DCT - APPLICATION SCREENING: neutro/inodore

DCT - PACKAGING: tanica