



Disinfettante alto livello Germocid per ferri chirurgici 1Lt

Germocid Instruments 1 Lt Disinfettante di alto livello per ferri chirurgici - Cf 1pz

Product codes:

Reference: 50 859 1011



Product gallery:



Product description:

Disinfettante di alto livello per ferri chirurgici.

Dispositivo Medico CE 0546 di classe lib conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID INSTRUMENTS è una soluzione concentrata attiva sia contro i batteri Gram positivi sia Gram negativi, i funghi, i micobatteri e i virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) che svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante, prima della sterilizzazione in autoclave, di strumenti chirurgici invasivi contaminati da materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici).

La soluzione diluita è priva di aldeidi, coloranti, sostanze tossiche.

Gli specifici inibitori di corrosione garantiscono l'assoluta compatibilità del prodotto con i materiali più frequentemente utilizzati in ambito odontoiatrico ed ospedaliero.

Composizione:

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g; coformulanti; acqua depurata q. b. a 100,00 g.

Come si usa: Il prodotto si usa diluito in acqua in concentrazioni variabili a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere.



Per preparare la soluzione utilizzare il misurino in dotazione. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo. La soluzione rimane stabile per una settimana.

In caso di uso frequente e con strumenti particolarmente contaminati o sporchi si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente. Può essere utilizzato anche in vasche a ultrasuoni.

Per uso professionale.

Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Product features:

THE DCT - TYPE: decontaminante strumenti

THE DCT - TYPE: decontaminante

THE DCT - TYPE: detergente

DCT - SHAPE: liquid

DCT - FEATURES: diluibile in acqua a concentrazione variabile a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere

DCT - EFFECT: detergente

DCT - EFFECT: decontaminante

DCT - IT CAN BE USED ON: acciaio

DCT - IT CAN BE USED ON: bagni ultrasuoni

DCT - IT CAN BE USED ON: strumenti chirurgici invasivi

DCT - ACTIVE AGAINST: batteri

DCT - ACTIVE AGAINST: micoplasmi

DCT - ACTIVE AGAINST: funghi

DCT - ACTIVE AGAINST: virus

DCT - ACTIVE AGAINST: lieviti

DCT - ELIGIBLE IN: ambito odontoiatrico

DCT - ELIGIBLE IN: ambito ospedaliero

DCT - APPLICATION SCREENING: neutro/inodore

DCT - COMPLIANCE: 93/42/CEE

DCT - COMPLIANCE: EN14476

DCT - COMPLIANCE: EN14563

DCT - COMPLIANCE: EN14348

DCT - COMPLIANCE: EN14562

DCT - COMPLIANCE: EN13624

DCT - COMPLIANCE: EN14561

DCT - COMPLIANCE: EN13727

DCT - COMPLIANCE: CE 0546

DCT - PACKAGING: flacone