




Contenitore SputEm - per raccolta espettorato stoccaggio e trasporto

Cf 72pz. Contenitore SputEm - per raccolta espettorato stoccaggio e trasporto in PP sterile a incarto singolo

Product codes:

Reference: 92 851 0103

Product gallery:

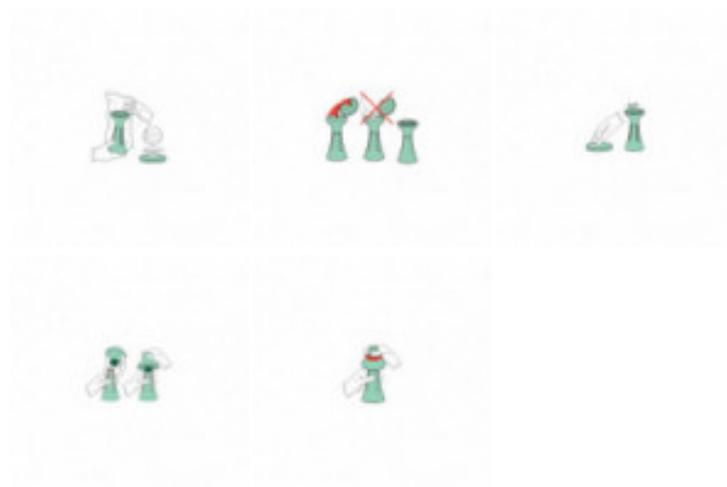

Product description:

Contenitore in PP per raccogliere, trasportare e processare campioni biologici.

L'unità è composta da una base con tubo a fondo conico da 50ml sterile rimovibile e centrifugabile fino a 5000 rpm

Tre finestre verticali consentono di vedere il contenuto della provetta.

L'ampia base garantisce stabilità e l'imbuto di raccolta è realizzato in modo tale che i campioni vengano raccolti direttamente all'interno della provetta senza il rischio di contaminazioni delle filettature esterne.

Il tappo a vite della provetta a fondo conico viene mantenuto sterile in ogni momento essendo inserito al di sotto del tappo a pressione posto nella parte superiore dell'imbuto.

L'etichetta del paziente è già applicata nella parte superiore dello SputEm e può essere



facilmente trasferita sulla provetta prima di partire per il laboratorio.
La base può essere utilizzata come supporto durante il transito.
Ogni Sput-Em è sterile ed incartato singolarmente.

Prima della raccolta

Rimuovere l'involucro

Compilare l'etichetta con di dati del paziente

Sollevarre il coperchio incernierato

Evitare di toccare l'interno dell'imbuto

Chiudere il coperchio dopo ogni utilizzo

Dopo la raccolta

Rimuovere il tappo a pressione sulla parte superiore dell'imbuto per esporre il tappo di chiusura della provetta

Rimuovere la parte superiore dell'imbuto e capovolgerlo sopra al tubo

Impugnare la parte centrale del sistema di raccolta ed avvitare il tappo

Gettare la parte superiore dell'imbuto

Rimuovere l'etichetta del paziente

Posizionare l'etichetta del paziente sul lato della provetta

Riposizionare la provetta nella sua base e inviare al laboratorio

Product features:

CNT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted

CNT - TIPO DE: el transporte de contenedores

CNT - CAPACIDAD MAX: 50ml

CNT - VOLUMEN: 50ml

LA CNT MATERIAL: PP

CNT - FORMULARIO: -

CNT - APERTURA: cierre de cremallera

CNT - CIERRE: -

CNT - CUBIERTA: incluido

CNT - TEMPERATURA MAX: -

CNT - TEMPERATURA MÍNIMA: -

CNT - AUTONOMÍA: -

CNT - CONTROL: -

CNT - COMPATIBILIDAD: tubos

LA CNT - QUE CONTENGAN: tubos

CNT - NIVELES: -

CNT - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: -

CNT - DIMENSIONES: -

LA CNT Y INT / EXT DIÁMETRO: -

CNT - DE ESPESOR: -

CNT - CUMPLIMIENTO: -

CNT - ACCESORIOS INCLUIDOS: provetta da 50ml

CNT - ACCESORIOS OPCIONALES: nd

CNT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: sistema per raccogliere

CNT - APROPIADO PARA: transporte



CNT - APROPIADO PARA: almacenamiento

CNT - APROPIADO PARA: manejo de muestras

CNT - EMBALAJE: envolver sola

CNT - RESISTENCIA: -

CNT - ESTÉRIL: usted

CNT - GRADUADO: usted

CNT - COMPLETO: provetta

CNT - GRID: -

CNT - APILABLE: nd

CNT - PUREZZA: -