

Salviette disinfettanti detergenti per superfici e dispositivi medici non invasivi

Germocid Wipes 220 in barattolo Panni detergenti disinfettanti per dispositivi medici non invasivi.-
Cf 1pz



Product codes:

Reference: 50 859 6121

Product gallery:

Product description:

Panni detergenti disinfettanti per dispositivi medici non invasivi.

Germocid Wipes è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

I fazzolettini GERMOCID WIPES sono studiati specificatamente per una profonda detersione e disinfezione di dispositivi medici non invasivi (riuniti, piani di lavoro, bracciali, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta, etc.) in uso presso gli studi medico/dentistici.

Rispetto ai prodotti tradizionali, il pratico formato monouso velocizza le procedure di pulizia e disinfezione delle superfici eliminando batteri (compreso TBC), lieviti e virus (compresi HIV, HBV e HCV).

Il basso contenuto d'alcol, inserito per agevolare l'evaporazione, non danneggia i materiali.

Come si usa:

Estrarre un panno dalla confezione e strofinare sulle superfici dei dispositivi medici da pulire e da

decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi.

Lasciare agire per i tempi indicati. Non risciacquare.

Tempi di contatto:

Virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV) 5 minuti

Batteri e lieviti 5 minuti

Micobatterio Tuberculare (TBC) 60 minuti

Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Product features:

DCT - TIPO: decontaminante

DCT - TIPO: detergente

DCT - FORMA: salviette

DCT - PECULIARITA': salviette detergenti e decontaminanti per strumenti non invasivi e superfici di laboratorio

DCT - EFFETTO: detergente

DCT - EFFETTO: decontaminante

DCT - UTILIZZABILE SU: tutte le superfici

DCT - UTILIZZABILE SU: strumenti chirurgici non invasivi

DCT - ATTIVO CONTRO: batteri

DCT - ATTIVO CONTRO: virus

DCT - ATTIVO CONTRO: lieviti

DCT - ATTIVO CONTRO: micobatteri

DCT - IDONEO IN: ambito odontoiatrico

DCT - IDONEO IN: ambito ospedaliero

DCT - IDONEO IN: laboratorio generale

DCT - PROFUMAZIONE: presente

DCT - CONFORMITA': CE 0546

DCT - CONFORMITA': EN13697

DCT - CONFORMITA': EN14476

DCT - CONFORMITA': EN14348

DCT - CONFORMITA': EN13624

DCT - CONFORMITA': EN13727

DCT - CONFORMITA': 93/42/CEE

DCT - PACKAGING: box dispenser